

Használati útmutató

Termék megnevezése: Fejsapka



 **Savaria-Dent Kft**
H-9700 Szombathely
Dr. Szabolcs Z. u. 5/A.
HUNGARY
Tel.: +36 94/505-840



Felhelyezése

Rendeltetése: I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz, amely fogsabályozó készülékekhez kapcsolódva a húzások támasztékaul szolgál. Oldalanként max. 2,5kg-os biztonsági modul kioldó erő terhelhetőségig.

Javallat

A termék fogsabályozó kezelés során szakorvosi javallatra alkalmazandó.

Ellenjavallat

A fejsapka viselése során bekövetkező allergiás reakciók

Alapanyaga: 100% pamut

Mosása 40°C alatt, kereskedelemben kapható pamut anyaghoz használatos általános mosószerrel.

A termék a továbbiakban nem használható, amennyiben anyagában vagy a varrások mentén szakadás, foszlás fedezhető fel.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.



A biztonsági modul csatlakozási helye

Version: 3.0 – 01.07.2021

Fejsapka

Terméklista

Rendelési kód	Kereskedelmi név
SD 48140	Fejsapka, keskeny fül
SD 48141	Fejsapka, széles fül
SD 48142	Fejsapka, keskeny fül középen
SD 48197	Farmer fejsapka, széles fül
SD 48198	Farmer fejsapka, keskeny fül
SD 48198-O	Farmer fejsapka, kerek pajeszos
SD 48199	Farmer fejsapka, keskeny 5 fül