


Gebrauchsanweisung

Bezeichnung für Produkt: **Kopfkappe**



 **Savaria-Dent Kft**
H-9700 Szombathely
Dr. Szabócs Z. u. 5/A.
HUNGARY
Tel.: +36 94/505-840



Anlegen

Verwendungszweck: Medizintechnisches Gerät, in die Risikoklasse I eingestuft, das mit Zahnsparren verbunden als Verankerung für die Zugelemente dient. Pro Seite Zugkraft bis zu einer Belastungsgrenze von max. 2,5 kg, darüber lösen sich die Zugelemente aus den Sicherheitsmodulen.

Indikation

Das Produkt kann im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung auf fachärztliche Empfehlung verwendet werden.

Kontraindikation

Beim Tragen der Kopfkappe auftretende allergische Reaktionen.

Material: 100 % Baumwolle

Waschen ist bis 40 °C mit im Handel erhältlichen, für Baumwollstoffe geeigneten allgemeinen Waschmitteln möglich.

Das Produkt darf nicht weiter benutzt werden, wenn in seinem Material oder entlang der Nähte Risse oder Verschleiß zu erkennen sind.

Schwerwiegende unerwartete Ereignisse, die mit dem Gerät zusammenhängen, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde desjenigen Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



Anschlusspunkt für das Sicherheitsmodul

Version: 3.0 – 01.07.2021

Kopfkappe

Produktliste

Bestellcode	Handelsbezeichnung
SD 48140	Kopfkappe, schmale Schlaufen
SD 48141	Kopfkappe, breite Schlaufen
SD 48142	Kopfkappe, schmale Schlaufen in der Mitte
SD 48197	Jeans-Kopfkappe, breite Schlaufen
SD 48198	Jeans-Kopfkappe, schmale Schlaufen
SD 48198	Jeans-Kopfkappe, rund, mit Backenteil
SD 48199	Jeans-Kopfkappe, schmal, 5 Schlaufen