

Használati útmutató


Termék megnevezése: Nyakpánt, nyakpárna



Savaria-Dent Kft
H-9700 Szombathely
Dr. Szabolcs Z. u. 5/A.
HUNGARY
Tel.: +36 94/505-840



Felhelyezése

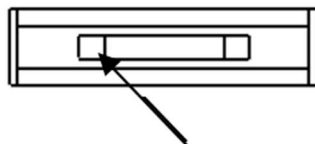

A biztonsági modul csatlakozási helye

Rendeltetése: I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz, amely fogszabályozó készülékhez kapcsolódva a húzások támasztékául szolgál. Oldalanként max. 2,5kg-os biztonsági modul kioldó erő terhelhetőségig.

Javallat

A termék fogszabályozó kezelés során szakorvosi javallatra alkalmazandó.

Ellenjavallat

A fejsapka viselése során bekövetkező allergiás reakciók

Alapanyaga: 100% pamut

Mosása 40°C alatt, kereskedelembe kapható pamut anyaghoz használatos általános mosószerrel.

A termék a továbbiakban nem használható, amennyiben anyagában vagy a varrások mentén szakadás, foszlás fedezhető fel.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Version: 3.0 – 01.07.2021

Nyakpánt, nyakpárna

Terméklista

Rendelési kód	Kereskedelmi név	Rendelési kód	Kereskedelmi név
SD 48160	Pufi + <u>strap</u> , széles fül	SD 48167	Fülpánt fekete
SD 48161	Farmer <u>strap</u> , keskeny fül	SD 48170	Pufi + <u>strap</u> , keskeny fül
SD 48162	<u>Strap</u> , széles fül	SD 48171	Pufi + <u>strap</u> , széles fül
SD 48162-L	<u>Strap</u> , széles fül L	SD 48173	Pufi kék + <u>strap</u> pink, keskeny fül
SD 48162-XL	<u>Strap</u> , széles fül XL	SD 48174	Pufi kék + <u>strap</u> sárga, keskeny fül
SD 48163	<u>Strap</u> , keskeny fül	SD 48181	<u>Jeans bunt</u> , széles fül
SD 48163-L	<u>Strap</u> , keskeny fül L	SD 48182	<u>Jeans bunt</u> , keskeny fül
SD 48163-XL	<u>Strap</u> , keskeny fül XL	SD 48186	<u>Jeans bunt</u> , farmer, keskeny fül
SD 48164	Pufi, gomblyukas	SD 48187	<u>Jeans bunt</u> , farmer, széles fül
SD 48166	Fülpánt kék		